


nosiboo^{*}eco[®]

Bedienungsanleitung

Nosiboo ECO
mundangetriebener Nasensauger



Lesen Sie die Bedienungsanleitung!

 **Herseteller: ATTRACT KFT.**
H-7624 Pécs, Barbakán tér 5.
Ungarn

E-Mail: customerservice@nosiboo.com
Web: www.nosiboo.eu
Tel: +36 72 551 642

Warn- und Sicherheitszeichen – Sie können die folgenden Zeichen in der Bedienungsanleitung und auf dem Etikett des Gerätes auffinden:



Name und Adresse des Herstellers



Lesen Sie die Bedienungsanleitung!



Warnung!

REF

Artikelnummer (Bestellungsnummer)

LOT

LOT-Nummer

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Warnung: Wenn die unten aufgelisteten Gefahrensituationen nicht vermieden werden, können diese zum tödlichen Unfall oder zur Verletzung des Bedieners führen!

Sicherheitsvorschriften bezüglich der allgemeinen Verwendung – Das Gerät dient zum Absaugen des Nasensekrets bei Kindern! Es darf für andere Zwecke nicht benutzt werden! Das Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden! Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern oder Menschen mit reduzierten körperlichen oder mentalen Fähigkeiten! Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, dass die einzelnen Bauteile richtig angeschlossen worden sind! Wenn nach der Nutzung des Gerätes an der Nase des Kindes allergische Hautausschläge oder Rötungen erscheinen, stellen Sie die Nutzung des Gerätes sofort ein! Suchen Sie mit Ihrem Kind einen Arzt oder Kinderarzt auf!

Sicherheitsvorschriften bezüglich wiederkehrender Verwendung des Gerätes – Desinfizieren Sie den Colibri Kopf nach jeder Nutzung! Lassen Sie die Bauteile des zerlegten Nosiboo ECO nicht in der Reichweite von Kindern, da sie die Teile in den Mund nehmen und verschlucken können!

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen – Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Kapitels „Umweltschutz“, wenn Sie das Gerät oder bestimmte Teile davon ordnungsgemäß entsorgen möchten!

1. Verwendung


Der Nosiboo Colibri Saugteil (das Gerät) dient zum Absaugen des Nasensekrets bei Kindern. Das zum Absaugen benötigte Vakuum wird mittels menschlicher Atmung erzeugt und durch den Mund (separater Schlauch und Sauger am Gerät) erzeugt.

Verwendungszweck: Vorbeugung gegen durch den Schnupfen hervorgerufene Komplikationen im Kindesalter und die Beschleunigung der Genesung durch das Absaugen des Nasensekrets.

Zu behandelnde Patientengruppe: Kinder (vorwiegend im Kleinkinderalter: jünger als 4 Jahre), die nicht fähig sind, selbst die Nase zu putzen, um das Nasensekret gezielt aus der Nase zu entfernen. **Krankheit oder Zustand, die eine Behandlung mit Nosiboo Colibri Saugteil erfordern (Indikationen):** Behandlung von Erkältung und Schnupfen und die ergänzende Behandlung von Entzündungen der superinfizierten Nebenhöhlen. **Situationen, in denen das Gerät nicht benutzt werden darf (Kontraindikationen):** Hämophilie, bei häufigen Nasenblutungen, die von den erweiterten Blutgefäßen der Schleimhaut der Nasenscheidewand ausgelöst werden, während der gleichzeitigen Behandlung mit einem Blutverdünnungsmittel, im Fall von angeborenen Fehlbildungen des Hals-, Nasen- und Ohrbereiches (z.B. Lippen-Kiefer-Gaumensegel-Spalte). **Idealer Bediener des Nosiboo Colibri Saugteils:** Alter: erwachsene Person älter als 18 Jahre. Geschlecht: nicht von Relevanz (kann Frau oder Mann sein). Kenntnisse: soll generell dem Alter entsprechende Kenntnisse haben. Bildung: min. Grundschule, die ordnungsgemäße Gerätebenutzung erfordert keine spezielle Kenntnisse.

2. Produktmerkmale und Inbetriebnahme

1. Reinigen Sie die Komponenten des Colibri Kopf (siehe Kapitel Reinigung)!
2. Setzen Sie den Flanschenschlauch in das Colibri-Gehäuse mit Anschluss!
3. Legen Sie die andere Hälfte des Colibri-Gehäuses auf!
4. Schließen Sie das Endstück an die Kante des Colibri-Gehäuses an!
5. Fügen Sie ein Ende des Schlauches mit dem Colibri Kopf zusammen!
6. Schließen Sie den Sauger am freien Ende des Schlauches an!

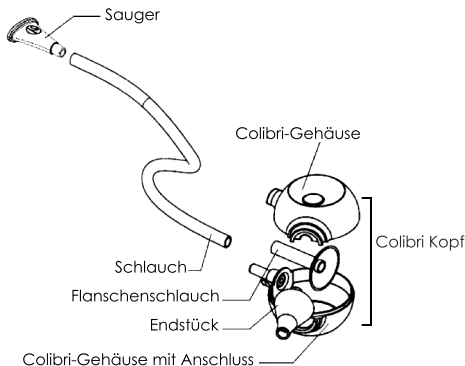

3. Gebrauchsanweisung – Der Colibri ECO kann bis zu 5 ml dünnflüssige Flüssigkeit aufnehmen. Das abgesaugte Sekret scheidet an der Innenwand des Colibri Kopf ab. Dank der sorgfältigen Planung bleibt das Sekret im Inneren des Gerätes. **So wird ohne Filtereinsatz verhindert, dass das Nasensekret des Kindes während des Saugvorganges in den flexiblen Schlauch oder in den Mund der Eltern gelangt.** Während der Gerätebenutzung sollten Säuglinge auf den Rücken liegen. Kleinkinder dürfen in stabiler Sitzposition behandelt werden. Nehmen Sie den Sauger in den Mund. Führen Sie das desinfizierte Endstück sanft in die Nasenhöhle des Kindes. Steuern Sie das Endstück leicht in Richtung Augapfel des Kindes und ein wenig gegen außen. An dieser Stelle dürfen Sie den Saugteil leicht bewegen. Nun können Sie mit dem zyklischen Saugen beginnen und tief durchatmen. Mit der Wiederholung dieser Methode gelangt man an die Öffnung der Kieferhöhlen, ohne dabei die Schleimhaut der Nasenmuschel und die Kapillare der Nasenscheidewand zu verletzen. Der Anschlusspunkt des Schlauches sollte während der Nutzung nicht nach unten zeigen. Bei der Auflösung des eingetrockneten oder dickflüssigen Sekrets hilft eine isotonische Kochsalzlösung. Verwenden Sie höchstens 5 ml davon für eine Behandlung. Nach der Anwendung der Kochsalzlösung sollte man einige Minuten warten, das auslaufende flüssige Nasensekret abwischen und den Saugvorgang mit dem Colibri Saugteil wiederholen. Nasentropfen und andere vom Arzt empfohlene Produkte sollten erst nach dem Nasensaugen verwendet werden! Die vorgeschlagene Einsatzdauer des Colibri Saugteiles beträgt 10 Sekunden je Nasenöffnung. Der Colibri Saugteil kann täglich mehrmals verwendet werden, das Ziel ist es, die Aufrechterhaltung der ruhigen Atmung des Kindes zu sichern. Empfohlene Häufigkeit der Behandlung: In begründeten Fällen täglich 2-3-mal, jedes Mal 10 Sekunden je Nasenöffnung, jeweils nach dem Aufwachen des Kindes, vor dem Essen und vor dem Schlafengehen.

4. Reinigung – Die Reinigung des Colibri ECO ist einfach: der Colibri Kopf kann in zwei Teile zerlegt werden. Dazu sollten zuerst der Schlauch und das Endstück entfernt werden. Danach kann man das Gehäuse in lauwarmem Wasser spülen, desinfizieren und anschließend trocknen lassen. Empfohlenes Desinfektionsmittel: Chicco Disinfectant.

5. Wartung und Lagerung – Vor Staub geschützt, trocken und gut verschlossen aufbewahren (z.B. in einem Schrank)! Bei mehreren Kindern ist es empfohlen, für jedes Kind einen eigenen Colibri Kopf zu benutzen und separat aufzubewahren. Nicht in der Nähe von Heizkörpern aufbewahren!

6. Umweltschutz – Die Entsorgung des Nosiboo ECO bedeutet kein besonderes Umweltrisiko und darf daher mit dem üblichen Hausmüll entsorgt werden.

7. Technische Daten

Gewicht (ohne Verpackung): 32 g

Gewicht (Verpackungseinheit): 105 g

Größe (Nosiboo ECO, BxHxT): 85 x 40 x 75 mm

Größe (Verpackungseinheit BxHxT): 130 x 42 x 90 mm

G geplante Lebensdauer: 3 Monate